


contacta<sup>h.</sup>

Portable IR  
Earphone Receiver  
IR-RXU

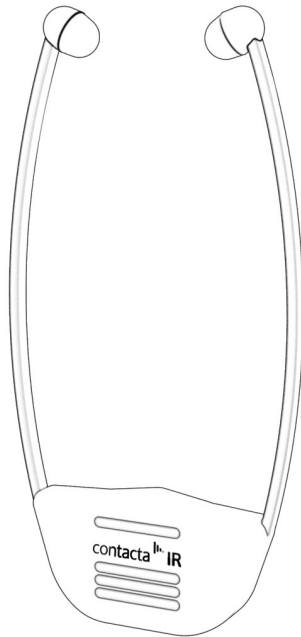

Installation &  
User Guide

1

## Récepteur stéthoscopique IR-RXU



### Livraison standard


- Récepteur stéthoscopique IR-RXU avec 1 accu
- Protection transparente pour la molette de réglage du volume
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

2

Les accus doivent être chargés pendant 14 heures avant leur première utilisation.  
Utilisez uniquement les accus originaux !

3

Observez la manière correcte de porter le récepteur stéthoscopique (contact visuel avec l'émetteur).

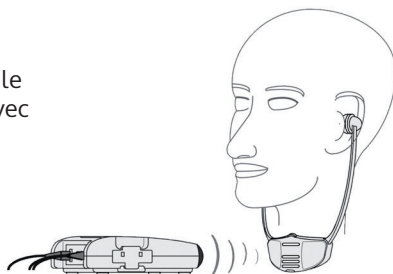


4

Réglage du volume sonore au récepteur stéthoscopique


Le récepteur ne dispose pas d'interrupteur.

Il se met automatiquement en marche lors de sa mise en place.

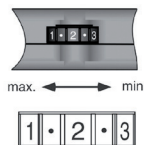

FR

5

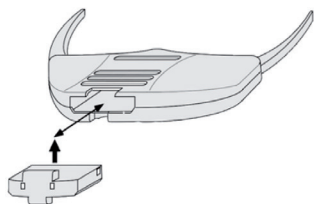

L'accu est à remplacer par un accu rechargé dès que la qualité de réception faiblit ou dès qu'apparaissent des distorsions.

**Attention: les accus ne doivent être, ni mis en place avec force, ni inversés.**




#### Utilisation correcte des piles rechargeables (accus)

Veiller à ce que les deux accus soient régulièrement utilisés.  
Un chargement permanent réduit la durée de vie des accus.

## 6

### Principe de fonctionnement

Le récepteur bicanal IR stéthoscopique IR-RXU permet de capter les signaux qui sont émis sur une fréquence de travail de 2,3 MHz et de 2,8 MHz.

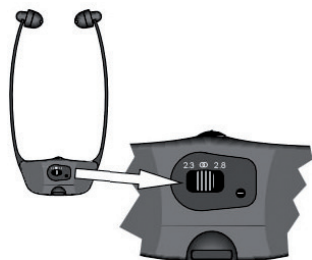

### Commutation Stéréo/2,3 MHz/2,8 MHz

La commutation entre les réceptions Stéréo, 2,3 MHz et 2,8 MHz se fait par le biais de l'interrupteur au dos du récepteur.

Position du commutateur :

- Au milieu : Fréquence de travail sur 2,3 MHz et 2,8 MHz (réception en stéréo)
- A gauche : Fréquence de travail sur 2,3 MHz (réception en mono des 2 côtés)
- A droite : Fréquence de travail sur 2,8 MHz (réception en mono des 2 côtés)


## 7

### Nettoyage des embouts en silicone

Pour des raisons d'hygiène, les embouts en silicone doivent être régulièrement nettoyés. Ces embouts peuvent être remplacés si nécessaire, ils sont disponibles.

**Utilisation de la protection transparente** pour la molette de réglage du volume: Oter les obturateurs en silicone pour mettre en place la protection transparente pour la molette de réglage du volume.


Protection transparente pour la molette de réglage du volume

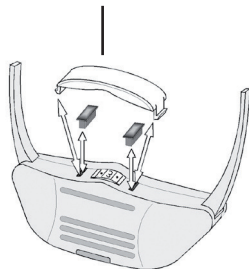

La protection transparente a pour fonction de protéger :

- a) contre tout dérèglage involontaire du volume,
- b) contre la poussière ou l'infiltration d'eau au niveau de la molette de réglage du volume.

Lors de l'utilisation, nous vous conseillons de suivre les indications suivantes :

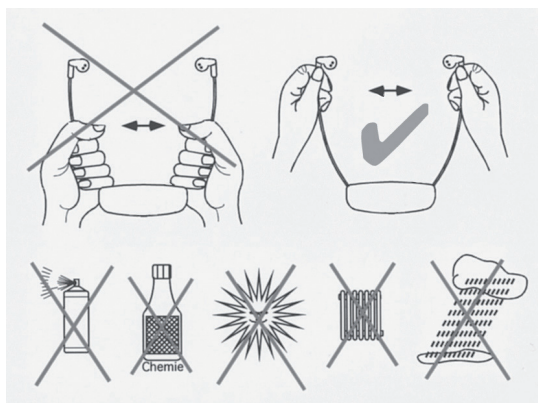

Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez uniquement un chiffon doux et légèrement humide. Les embouts salis doivent être remplacés.

Les dommages causés par une non-observation de ces conseils ou par de fortes salissures, ne sont pas couverts par la garantie.

10

### **Important**

Cet appareil n'est pas protégé contre les projections d'eau. Ne pas poser d'objet rempli d'un liquide, par exemple un vase, près de l'appareil.

De même, ne pas poser près de l'appareil une source de combustion comme par exemple une bougie allumée.

11

### **Garantie**

Le récepteur stéthoscopique IR-RXU est très fiable. Si en dépit d'un montage et d'un emploi corrects, des dysfonctionnements apparaissent, veuillez contacter votre vendeur spécialisé ou vous adresser directement au fabricant. La garantie comprend la réparation gratuite y compris la réexpédition. Nous recommandons de renvoyer l'appareil dans son emballage d'origine. Ne le jetez donc pas.

Cette garantie ne s'applique pas pour des dommages occasionnés par une mauvaise manipulation ou encore des tentatives de réparation par des personnes non autorisées (endommagement du cachet signalétique de l'appareil).

Les réparations sous garantie ne sont exécutées qu'après réception du coupon de garantie dûment rempli ou d'une copie de la facture ou du ticket de caisse du revendeur.

**Le numéro de l'appareil doit être indiqué dans tous les cas.**



**Gestion des déchets** électriques et électroniques (dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens disposant d'un système de collecte distinct pour cette classe de déchets). Le symbole sur le produit ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté comme les déchets ménagers ordinaires, mais apporté à un point de collecte pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. En respectant ces règles pour votre équipement usagé, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement et de votre santé.

Le recyclage des matériaux contribue à réduire la quantité de matières premières utilisées. Pour obtenir de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, renseignez-vous auprès de votre commune, des services municipaux d'élimination des déchets ou auprès de votre vendeur.

## Spécifications techniques du récepteur IR-RXU

Modulation	FM, stéréo et mono
Fréquences porteuses IR	2,3 - 2,8 MHz
Bande passante	BF 15-20000 Hz
Distorsion harmonique	< 1 %
Rapport signal/bruit typ.	60 dB
Temps de charge (accu)	env. 14 h
Autonomie par accu	env. 7 h
Puissance sonore max.	env. 120 dBA
Poids	57 g

FR

Cet appareil est conforme aux exigences des directives communautaires ci-dessous :



- 2011/65/CE Directive RoHS
- 2012/19/CE Directive WEEE
- 2014/30/CE Directive EMC
- 2014/35/CE Directive LVD

La conformité avec les directives ci-dessus est attestée par le logo CE apposé sur l'appareil.

Sous réserve de modifications techniques.



Local dealer:

UK & ROW  
+44 (0) 1732 223900  
sales@contacta.co.uk

US & Canada  
+1 616 392 3400  
info@contactainc.com